


# Attends® Pull-Ons



## Pukemisohje


1

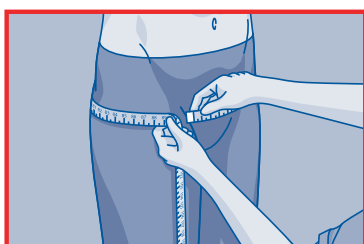

### Valmistelut

Tarvittaessa voi mitata lantion- ja vyötärönympäryksen oikean koon varmistamiseksi.


2

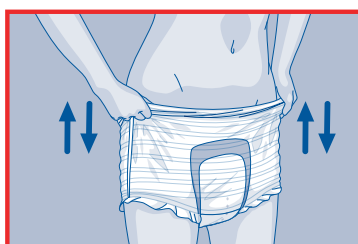

### Pukeminen

Attends Pull-Ons - inkohousuja voi käyttää tavallisten alusvaatteiden tavoin ja vaippaa voi pukea ja riisua uudelleen useita kertoja.


3

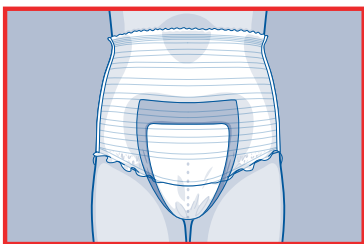

### Istuvuus

Inkohousujen joustavuus antaa hyvän ja miellyttävän istuvuuden. Hengittävä materiaali on ihoystävällinen.

4

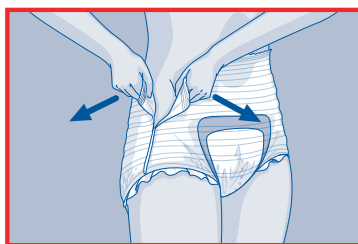

### Riisuminen

Inkohousujen vaihtaminen ja riisuminen on helppoa. Vaipan voi joko vetää alas tai repiä sivut auki.

## Neuvoja ja vinkkejä

### Tuotevalikoima

- Tarvittaessa voi mitata lantion- ja vyötärönympäryksen oikean koon varmistamiseksi.
- Valitse tuotteen imukykytaso (3, 5 tai 8) virtsankarkailuasteen mukaan ja siirry suurempaan imukykyynumeroon tarvittaessa.
- Pull-Ons -inkohousut ovat hyvä vaihtoehto esim. omatoimisesti liikkuville henkilöille.

### Pukeminen

- Varmista, että vaippa on puettu oikein päin.

### Vaihtaminen

- Tarkista kosteusindikaattori - jos kosteusindikaattorista on hävinnyt yli puolet (60%) vaipan pituussuunnassa, tulisi tuote vaihtaa. Muuten tuotetta voi vielä käyttää.

### Hävittäminen

- Rullaa vaippa ja käsittele toimipisteesi jätteenkäsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä laita vaippaa WC-pönttöön.

Lisätietoja saadaksenne, vieraillkaa sivuillamme [www.attends.fi](http://www.attends.fi)